



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



NOCOIL Dr. S. Montemurro

Tubo Trans-anal, estéril y monouso




El **NOCOIL** es un tubo trans-anal levemente cónico, de silicona medica, blando y elástico, estudiado para revestir la zona del canal anal sometido a anastomosis del tipo colon-ano-rectal.

La función del **NOCOIL** es la de eliminar la presión endoluminal, que alcanza valores muy elevados durante la defecación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ◆ Atraumático
- ◆ Envase individual estéril
- ◆ Realizado en silicona medica
- ◆ Disponible en las versiones de 60mm, 70mm y 80mm de largo

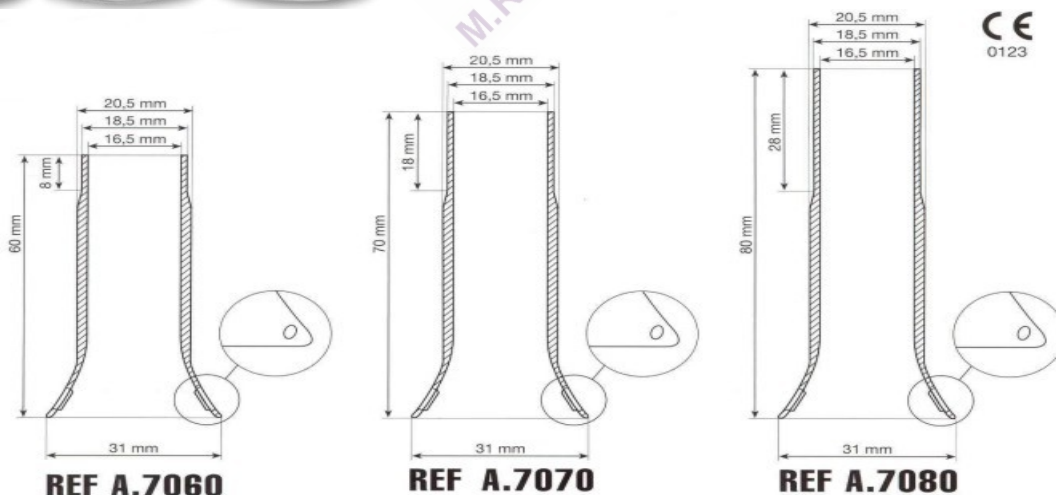

INDICACIONES DE EMPLEO

El tubo trans-anal **NOCOIL** tiene un diámetro exterior fijo de 18 mm e interior de 16 mm y una longitud variable de 6 a 8 cm.

Finalizada la intervención quirúrgica, después de la anastomosis, con el paciente todavía anestesiado, insertar el **NOCOIL** lubricado, (en los casos de coloanastomosis debe ponerse vía estoma, y en los demás casos por vía anal), hasta que las aletas del tubo toquen la piel del perineo.

Una vez situado correctamente, es necesario fijar el tubo con un par de puntos de sutura. Se aconseja la eliminación del **NOCOIL** el sexto día, salvo otra indicación médica.

No utilizar el dispositivo si el envase no está integro. No existen contraindicaciones de uso.

Unidad de Venta: Caja de 3 unidades