



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



DILASTOM® DILATADOR ESTOMAL

Referencia pedidos: **A2002**



Entre las complicaciones que más preocupan después de una colostomía es la estenosis o estrechamiento del lumen del estoma que se manifiesta, según los datos de la experiencia mundial, en cerca de 8-10% de los casos. Para definir con precisión si la ESTENOSIS ESTOMAL ha ocurrido se debe tener en cuenta el calibre del estoma, la elasticidad de la pared intestinal y la del tejido circundante.

Las estenosis se distinguen en PRECOCES y TARDÍAS dependiendo del intervalo de tiempo post-operatorio en que la estenosis se vuelve evidente, y en CUTÁNEAS y FASCIALES dependiendo de si el área del tejido afectado sea a nivel cutáneo o a nivel de la aponeurosis muscular.

Cuando se manifiesta un estrechamiento o estenosis en una colostomía, pueden experimentarse dificultades para descargar las heces, sin son de consistencia dura, por el lumen del estoma, produciendo un fuerte dolor. Además es muy problemático la ejecución de procedimientos de irrigación por la difícil introducción del cono de riego y del agua de lavado, obligando a veces a maniobras también peligrosas. A instancias de una terapia con **DILASTOM** se puede detener el progresivo estrechamiento del orificio externo, y si es correctamente aplicado, dar marcha atrás al proceso.

El objetivo de una terapia de dilatación es evitar y parar el progresivo estrechamiento del orificio externo de la colostomía, evitando la necesidad de una intervención quirúrgica correctiva

DILASTOM es introducido con ayuda de un lubricante y por una adecuada maniobra de atornillado.

La forma cónica y las paredes lisas del **DILASTOM** permiten al dilatador, una vez introducido, quedar fácilmente colocado con una simple presión efectuada con el dedo sobre la base.


La terapia de dilatación debe empezar con el diámetro más pequeño de **DILASTOM** manteniendolo en su sitio por un periodo de 5-10 minutos, según la prescripción del médico, y repetir la operación por lo menos cada 12 horas. El periodo del tratamiento normalmente oscilará entre uno y dos meses, regulados por los consejos dados por él especialista.

En la segunda fase se utilizará el diámetro más grande de **DILASTOM** y el procedimiento de aplicación y duración del tratamiento es similar al del dispositivo mas pequeño.


DILASTOM está fabricado en material plástico inerte y conforme a los valores límite previstos en la FARMACOPEA OFICIAL..

No se conocen, ni se han descrito efectos adversos al uso prolongado de **DILASTOM**.

DILASTOM esta específicamente diseñado y estudiado para que el paciente pueda realizar la terapia de dilatación en su domicilio de un modo muy simple.

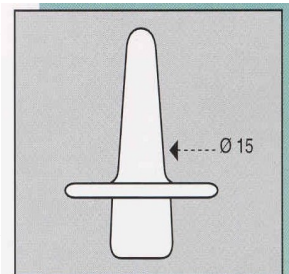

Dilatador **DILASTOM**
de calibre menor

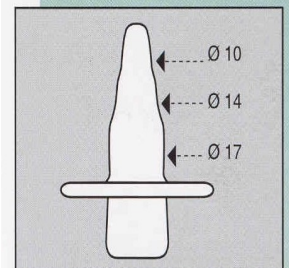

Dilatador **DILASTOM**
de calibre superior



Modalidad de Uso del
Dilatador **DILASTOM**



Edición: noviem/2023