



M.R.M. COMERCIAL
Sociedad Anónima



EPO FLIER Modelo: A 4086

La operación de Delorme Interna es una técnica con control visual utilizada para intervenir en caso de obstrucción fecal causada por intususcepción (**prolapso**) rectal.

El **EPO FLIER** es un **kit** diseñado específicamente para la ejecución óptima de la intervención.

Se compone de tres piezas :

Un **Anoscopio** de 34,30mm Ø de diámetro con pestañas y orificios, un **Obturador** para la introducción y una **Valva** de ventana rotatoria con alas tipo gaviota.

Modo de Uso :

Con el paciente en posición de litotomía y bajos los efectos de anestesia epidural, se inserta el anoscopio en el ano, se retira el Obturador y se fijan las pestañas al perineo mediante puntos de sutura.

A través del anoscopio y de la válvula giratoria se infiltra la submucosa rectal con solución salina y adrenalina 1:200.000.

Se efectúa una incisión circular de la mucosa 2 centímetros por encima de la línea dentada y se diseña la mucosa unos 8 a 15cm según el tamaño de la intususcepción o **prolapso**.

Utilizando la valva giratoria se procede a un pliegue de la musculatura circular del recto dividiendo la circunferencia anal en cuatro cuadrantes, iniciando la misma en los puntos cardinales (horas 3-6-9-12).

Se coloca el primer punto de sutura 2-0 de material reabsorbible en la posición de las 12 h. El punto debe incluir el margen distal de la mucosa; se sigue verticalmente hasta alcanzar el margen proximal de la mucosa.

A continuación, se secciona el cilindro muco-submucoso y se anudan los primeros cuatro puntos. El pliegue se repite en el resto de los espacios (2 o 3 puntos por cada cuadrante), permitiendo acortar " en fuelle" la pared muscular del recto, corrigiendo así la intususcepción recto-anal y el acercamiento de los márgenes de la mucosa distal y proximal. A veces se necesitan puntos muco-mucosos adicionales para completar la anastomosis.

El procedimiento también se puede efectuar en una cirugía plástica del músculo elevador en caso de rectocele de tipo II-III.

INFORMACION para PEDIDOS.

Referencia: 10620	EPO FLIER A4086	Caja de 25 unidades
--------------------------	------------------------	----------------------------



Edición febrero/23